



SWE



DMV Ultra™ / DMV 45™

För hårda och syregenomträngliga kontaktlinser

Avsedd användning

Både DMV Ultra och DMV 45 är utformade för att sätta in och ta ut hårda och syregenomträngliga kontaktlinser. DMV Ultra ska hållas vertikalt och DMV 45 i vinkel.

Bruksanvisning



Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol och låt lufttorka innan du använder den första gången.

UTTAGNING – Fukta sugproppen på DMV Ultra / DMV 45 och för den till ögat. Kontrollera att kontaktlinsen sitter mitt på ögat. Placera sugproppen framför linsen och låt den vidröra linsens mitt med hjälp av en spegel. Ta ut kontaktlinsen ur ögat. När du har tagit kontaktlinsen, för den försiktigt i sidled från sugproppen.

INSÄTTNING – Placera den fuktade kontaktlinsen på den ytliga gropan i den smala änden på handtaget. Den fuktade linsen fastnar i detta läge. Låt linsen vidröra ögat.

Följ anvisningarna från din optiker.

Rengöring

Rengör DMV Ultra / DMV 45 med 70 % isopropylalkohol efter varje användning och låt lufttorka. Förvara produkten i fodralet efter torkning. Byt ut den var sjätte månad.



Försiktighetsåtgärd: Om produkten av misstag fastnar på ögat, för den mot ögonvrån och ta bort den genom att vrida.



Warning: Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor som handkräm, härgel, nagellackborttagningsmedel och kraftigt oxiderande ämnen.



Warning: Kvävningsrisk. Förvara denna och andra medicintekniska produkter utom synhåll för barn. Denna produkt rekommenderas inte vid ögonsjukdom eller skadade ögon. Om du får ögonirritation, ovanlig synnedläggelse eller smärta, kontakta optiker.



Warning: Det finns inga bevis för allergiska problem med produkten. **Den innehåller torr naturgummi. Den innehåller inte flytande latex, en känd allergen.**



Använd INTE DMV Ultra / DMV 45 för MJUKA kontaktlinser eller hybridkontaktlinser.

Om en allvarlig incident har uppkommit i samband med produkten, rapportera det till tillverkaren. Om du bor i ett EU-land, rapportera händelsen till behörig myndighet i det medlemsland där du bor.

Denna produkt gör det möjligt för kontaktlinsebärare att sätta in och/eller ta ut kontaktlinser för att använda dem enligt avsedd användning. Således anses denna produkt vara en medicinteknisk produkt.

Avfallshantering

DMV Corporation rekommenderar att använda DMV-produkter kasseras i enlighet med lokala anvisningar vid tidpunkten för kassering.



Denna produkt en medicinteknisk produkt



Förvaras vid högst 105°C



Läs bruksanvisningen
dmvcorp.com



Skyddas mot direkt solljus



En patient – flera användningar



Tillverkningsdatum



Importör



Tillverkare



Tillverkningsland



Auktoriserad representant



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

