




lav

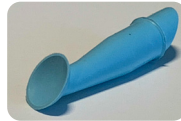

DMV Ultra™ / DMV 45™

Cietajām un gāzi caurlaidīgajām kontaktlēcām

Paredzētā izmantošana

DMV Ultra un DMV 45 ir paredzēti cieto un gāzi caurlaidīgo kontaktlēcņu ielikšanai un izņemšanai. DMV Ultra jātur vertikāli, bet DMV 45 ir jātur noliekts leņķī.

Lietošanas instrukcija

Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

Izņemšana – Samitriniet DMV Ultra / DMV 45 piesūcekņa kausiņu un virziet to acī. Pārīlecieties, ka kontaktlēca atrodas acs centrā. Skatoties spoguļi, novietojiet piesūcekņa kausiņu pretī lēcai un pieskarieties ar to lēcas centram. Izņemiet kontaktlēcu no acs. Pēc izņemšanas uzmanīgi noslidiniet kontaktlēcu uz sāniem no piesūcekņa kausiņa.

Ielikšana – Uzlieciet mitro kontaktlēcu uz seklā padzīlējuma kātiņa šaurākajā galā. Mitrā lēca pielips šajā pozīcijā. Ar lēcu pieskarieties acij.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

Tīrīšana

Pēc katras DMV Ultra / DMV 45 izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tam dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī. Ieplānojiet tās nomaiņu reizi sešos mēnešos.

Uzmanību! Ja ierīce nejauši pieļip acij, bīdiet to uz acs kaktiņu un ar pagriezienu kustību izņemiet to.

Bridinājums. Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķidrumiem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmejs uz spēcīgi oksidētāji.

Bridinājums. Aizīršanās risks. Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.

Bridinājums. Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu**, kas ir zināms alergēns.

NELIETOJĒT DMV Ultra / DMV 45 MĪKSTAJĀM vai hibrida kontaktlēcām.

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcu nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.

Atkritumu likvidēšana

DMV Corporation iesaka likvidēt izlietotos DMV izstrādājumus atbilstoši likvidēšanas brīdī spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.



Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce



Sargāt no tiešas saules gaismas



Importētājs



Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F



Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai



Ražotājs



Skatīt lietošanas instrukciju dmvcorp.com



Ražošanas datums



Ražošanas valsts



Pilnvarotais pārstāvis



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

