



dan



DMV CLASSIC™

Til hårde & gasgennemtrængelige kontaktlinser

Påtænk anvendelse

Denne enhed er beregnet til isætning og udtagning af hårde og gasgennemtrængelige kontaktlinser.

Brugsanvisning

Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende lufttørring.

Udtagning – Fugt sugekoppen. Sørg for, at kontaktlinsen er centreret på øjet. Klem håndtaget på DMV Classic sammen, og før den til midten af kontaktlinsen. Lad den berøre midten af linsen ved brug af et spejl. Mens DMV Classic berører linsen, frigøres trykket lidt på håndtaget, hvilket får DMV Classic til at klæbe til linsen. Tag kontaktlinsen direkte ud fra øjet. Efter udtagning klemmes håndtaget igen sammen til frigørelse af sugekoppen og fjernelse af linsen fra sugekoppen.

Isætning – Anbring den våde kontaktlinse på koppen uden at presse håndtaget sammen. Den våde linse vil klæbe til koppen. UNDLAD at klemme på håndtaget under isætning af linsen. Anbring kontaktlinsen direkte på øjet.

Følg anvisningen fra din kontaktlinsetilpasser/øjneplejerson.

Rensning

DMV Classic skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring. Hold luftkanalen fri for materiale. Planlæg at udskifte den hver 6. måned.

Forsigtighedsforanstaltning: Hvis DMV Classic utilsigtet sætter sig fast på øjet, klemmes på håndtaget til standsning af sugning, og enheden fjernes fra øjet.

Forsigtig: Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hårgeler, neglelakfjerner og kraftige oxidideringsmidler.

Forsigtig: Kvælningfare. Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet. Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din øjneplejerson.

Forsigtig: Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.

Brug IKKE DMV Classic til bløde kontaktlinser eller hybridlinser.

Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor du befinder dig.

Dette produkt gør kontaktlinsebrugere i stand til at isætte og/eller udtage deres kontaktlinser, så de kan bruges i henhold til det påtænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.

Bortskaffelse af affald

DMV Corporation anbefaler, at brugte DMV-produkter bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser, der er gældende på tidspunktet for bortskaffelse.

Dette produkt er et medicinsk udstyr

105°C
220°F
Må ikke opbevares ved temperaturer over 105°C

Læs brugsanvisningen
dmvcorp.com

Autoriseret repræsentant

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Beskyttes mod direkte sol

Til enkelt patient - flergangsbrug

Fremstillingsdato

Importør

Fabrikant

Fremstillingsland

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA