



por



DMV CLASSIC™

Para lentes de contacto rígidas e permeáveis aos gases

Utilização prevista

Este dispositivo foi concebido para introduzir e remover lentes de contacto rígidas e permeáveis aos gases.

Instruções de utilização

⚠ Antes de utilizar pela primeira vez, limpe o dispositivo com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar.

Remoção – Humedeça a ventosa. Assegure-se de que a lente de contacto está centrada no olho. Comprima a pega do Classic e guie-o até ao centro da lente de contacto. Toque na frente da lente enquanto se olha no espelho. Enquanto o Classic está a tocar na lente, liberte ligeiramente a pressão sobre a pega para que o Classic adira à lente. Remova a lente de contacto diretamente do olho. Após a remoção, volte a apertar a pega para libertar a sucção e remover a lente da ventosa.

Introdução – Place the wet contact lens on the cup without compressing the handle. The wet lens will adhere to the cup. DO NOT squeeze the handle while inserting the lens. Place the contact lens directly on the eye.

Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto/ocular.

Limpeza

De cada vez que utiliza o DMV Classic, limpe-o com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar. **Depois de estar seco, armazene o dispositivo na respetiva caixa.** Mantenha o canal de ar livre de detritos. Planeie a respetiva substituição a cada seis meses.

⚠ **Precaução:** Se o DMV Classic ficar acidentalmente preso no olho, aperte a pega para libertar a sucção e removê-lo do olho.

⚠ **Cuidado:** Mantenha este produto afastado de líquidos como creme para as mãos, gel para o cabelo, removedor de verniz de unhas e agentes oxidantes fortes..

⚠ **Cuidado:** Perigo de asfixia. Mantenha este e todos os outros dispositivos médicos fora do alcance das crianças pequenas. Não se recomenda a utilização deste produto em caso de doença ou lesão ocular. Em caso de irritação ocular, perturbação involgar **da vista ou dor, consulte o seu especialista ocular.**

⚠ **Cuidado:** Embora não haja evidências de alergias com este produto, o produto contém borracha natural seca. Não contém látex líquido, que é um alergénio conhecido.

⚠ **NÃO utilize o DMV Classic para lentes de contacto HIDRÓFILAS ou híbridas.**

Se lhe tiver ocorrido qualquer incidente grave em relação a este dispositivo, notifique o fabricante. Caso resida na UE, notifique a autoridade competente do Estado-Membro onde vive sobre o incidente.

Este produto permite que as pessoas que usam lentes de contacto as introduzam e/ou removam para as utilizarem de acordo com a finalidade prevista. Portanto, considera-se que este produto é um dispositivo médico.

Eliminação de resíduos

A DMV Corporation recomenda que os produtos DMV utilizados sejam eliminados em conformidade com os regulamentos locais em vigor no momento da eliminação.

MD Este produto é um dispositivo médico.

105°C
220°F
Não armazenar a uma temperatura superior a 105 °C / 220°F

Ler as instruções de utilização.
dmvcorp.com

REP Representante autorizado

EU
Bilos Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Proteger da luz solar direta.

Doente único — utilização múltipla

Data de fabrico

Importador

Fabricante

País de fabricação

EC REP
Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

CH REP
MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

UK REP
Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

UK CA **CE**