




deu

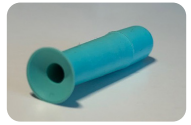

DMV CLASSIC™

Für harte und gaspermeable Kontaktlinsen

Verwendungszweck

Dieses Produkt eignet sich zum Auf- und Absetzen von harten (formstabilen) und gaspermeablen Kontaktlinsen.

Gebrauchsanweisung

Reinigen Sie den DMV Classic Sauger vor dem ersten Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.



ABSETZEN – Benetzen Sie die Saugfläche mit Kochsalzlösung. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kontaktlinse zentriert vor der Pupille sitzt. Drücken Sie den Griff des Saugers fest zusammen und führen Sie den Sauger zum Auge. Setzen Sie den Sauger auf die Kontaktlinsenoberfläche, während Sie in den Spiegel sehen. Während der Sauger die Linsenoberfläche berührt reduzieren Sie den Druck auf den Saugergriff, um die Kontaktlinse anzusaugen. Nehmen Sie die Kontaktlinse vom Auge.

Nach dem Absetzen, drücken Sie den Saugergriff wieder zusammen, um die Sogwirkung zu lösen. Jetzt können Sie die Kontaktlinse vom Sauger nehmen.

AUFSETZEN – Setzen Sie die benetzte Kontaktlinse auf den Sauger ohne den Saugergriff zusammenzudrücken. Die benetzte Kontaktlinse wird dort haften. Halten Sie den Griff locker zwischen den Fingern ohne Druck auf den Griff auszuüben.

Führen Sie den Sauger mit der Kontaktlinse zum Auge und setzen Sie sie vorsichtig in die Mitte der Hornhaut vor die Pupille.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarztes.

Reinigung

Reinigen Sie den DMV Classic Sauger nach jedem Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Bewahren Sie ihn in seinem Behälter auf. **Halten Sie den Lufkanal frei von Verunreinigungen.** Planen Sie einen Austausch nach 6 Monaten.



Vorsichtsmassnahme: Falls Sie mit dem Produkt versehentlich die Augenoberfläche berühren und es dort haftet, drücken Sie den Griff, um die Sogwirkung aufzuheben und das Produkt vom Auge zu nehmen.



Achtung: Halten Sie dieses Produkt fern von Handcreme, Haargel, Nagellack-Entferner und stark oxidierenden Mitteln.



Achtung: Erstickungsgefahr! Halten Sie dieses und alle anderen Medizinprodukte von kleinen Kindern fern. Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt bei erkrankten oder verletzten Augen zu verwenden. Wenn Sie ein gerötetes Auge haben oder ungewöhnlich schlecht sehen oder Schmerzen haben, suchen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt auf.



Achtung: Obwohl kein Hinweis auf Allergien vorliegt, macht DMV Corporation darauf aufmerksam, dass dieses **Produkt aus trockenem Naturkautschuk gefertigt** wird. Das **Material enthält jedoch kein flüssiges Latex**, das als Allergen bekannt ist.



Verwenden Sie den DMV Classic Sauger **NICHT für weiche Kontaktlinsen und Hybridlinsen.**

Für den Fall, dass Sie einen ernststen Vorfall in Verbindung mit diesem Produkt erleben, melden Sie dies dem Hersteller. Falls Sie in der EU wohnen, melden Sie den Vorfall, der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaates.

Mit diesem Produkt können Kontaktlinsenträger ihre Kontaktlinsen einsetzen und/oder entfernen, um sie entsprechend ihrem Verwendungszweck zu benutzen. Deshalb wird es als Medizinprodukt betrachtet.

Entsorgung

DMV Corporation empfiehlt, gebrauchte DMV-Produkte gemäß den zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden örtlichen Vorschriften zu entsorgen.



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt



Nicht über 105°C aufbewahren



Gebrauchsanweisung beachten
dmvcorp.com



Bevollmächtigter Vertreter



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Vor direkter Sonne schützen



Einzelner Patient - mehrfach anwendbar



Herstellungsdatum



Importeur



Hersteller



Herstellungsland



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

