



nld



# DMV Luma Serter Plus™

## Verlichte inzethulp voor grote lenzen

### Beoogd gebruik

De DMV Soft Lens Handler pincet is bedoeld voor het inzetten en verwijderen van zachte contactlenzen.

### Instructies voor gebruik

Maak vóór het eerste gebruik het hulpmiddel schoon met 70% isopropylalcohol en laat het aan de lucht drogen.

**VERWIJDEREN** – Duw de grijppootjes stevig tegen de voorkant van de zachte contactlens. Controleer met een spiegel of de lens op het hoornvlies zit. Knijp de grijpers voorzichtig samen om de contactlens uit te nemen.

**INZETTEN** – Plaats een vochtige contactlens op het smalle uiteinde van het hulpmiddel, aangeduid door het pijltje. Laat de lens overlappen met het uiteinde van het hulpmiddel, zodat u de voortgang door de lens kunt zien.

Volg de instructies van uw contactlensspecialist/oogspecialist.

### Schoon

Maak het hulpmiddel na elk gebruik schoon met 70% isopropylalcohol en laat aan de lucht drogen. Bewaar het hulpmiddel in zijn doosje nadat het droog is. Vervang het om de zes maanden.

**Voorzorgsmaatregel:** Als u het hulpmiddel per ongeluk op het oogoppervlak plaatst, hoeft u het enkel van het oog te halen want er is geen zuigkracht. Schuif het hulpmiddel niet over het oppervlak van het oog.

**Waarschuwing:** Houd dit product uit de buurt van vloeistoffen zoals handcrème, haargel, nagellakverwijderaar en krachtige oxiderende middelen.

**Waarschuwing: Verstikkingsgevaar. Houd dit en alle andere medische hulpmiddelen uit de buurt van kleine kinderen.** Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik bij zieke of verwonde ogen. Raadpleeg uw oogspecialist als u last heeft van een geïrriteerd oog, een ongewoon slecht zicht of pijn.

**Waarschuwing:** Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor allergieproblemen met dit product, **bevat het wel droog natuurlijk rubber. Het bevat geen vloeibare latex**, een bekend allergeen.

**GEBRUIK dit hulpmiddel NIET met harde, zuurstofdoorlatende, sclerale of hybride contactlenzen.**

Licht de fabrikant in als u een ernstig incident heeft gehad dat verband houdt met dit hulpmiddel. Als u in de EU woont, dient u het incident te melden bij de bevoegde instantie in de lidstaat waar u woonachtig bent.

Dit product stelt dragers van contactlenzen in staat om hun contactlenzen in te brengen en / of te verwijderen om ze te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel. Daarom wordt dit product beschouwd als een medisch hulpmiddel.

### Afvalverwijdering

DMV Corporation adviseert om gebruikte DMV-producten af te voeren overeenkomstig de lokale voorschriften die op het moment van verwijdering van kracht zijn.

Medisch hulpmiddel

Niet warmer bewaren dan 105°C / 220°F

Volg de instructies  
dmccorp.com

Gemachtigde vertegenwoordiger

Beschermen tegen direct zonlicht

Eén patiënt – meervoudig gebruik

Datum van fabricage

Importeur

Fabricante

Land van vervaardiging

EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

