



DMV Soft Lens Handler™

Extractor / aplicador de lentes de contacto blandas

Uso previsto

DMV Soft Lens handler está previsto para poner y quitar lentes de contacto blandas.

Instrucciones de uso

Antes de usar el dispositivo por primera vez límpielo con alcohol isopropílico al 70 % y deje que se seque al aire.

Retirada – Presione las almohadillas de agarre firmemente contra la parte frontal de la lente de contacto blanda. Asegúrese de que la lente se encuentra sobre la córnea usando un espejo. Apriete suavemente las almohadillas para sacar la lente de contacto.

Aplicación – Coloque una lente de contacto humedecida sobre el extremo pequeño del dispositivo donde indica la flecha. La lente debe solapar el extremo del dispositivo, de modo que usted pueda ver el proceso a través de la lente.

Siga las instrucciones del profesional que le haya ajustado las lentes de contacto o del oftalmólogo.

Limpieza

Después de usar el dispositivo debe limpiarlo con alcohol isopropílico al 70 % y dejar que se seque al aire. Guarde el dispositivo en su estuche cuando se haya secado. Deberá sustituirlo cada seis meses

Precaución: Si coloca el dispositivo de manera accidental sobre la superficie del ojo no se produce succión, por lo que podrá retirarlo tal cual. Evite deslizar el dispositivo sobre la superficie del ojo.

Precaución: Mantenga este producto alejado de los líquidos, como crema de manos, geles para el cabello, quitaesmalte de uñas y oxidantes fuertes.

Precaución: Riesgo de asfixia. Mantenga este y otros productos sanitarios fuera del alcance de los niños pequeños. El uso de este producto no está recomendado en caso de ojos con alguna patología o lesiones. Si se le irrita el ojo o experimenta algún problema visual inusual o dolor acuda a su oftalmólogo.

Precaución: No hay evidencia de problemas de alergia con este producto, aunque **contiene caucho natural seco**. No contiene látex líquido, un alérgeno conocido.

Precaución: NO USE este dispositivo con lentes de contacto duras, permeables al gas, esclerales o híbridas.

Deberá notificar al fabricante cualquier evento grave que se haya producido en relación con este dispositivo. Si reside en la UE deberá notificar el incidente a la autoridad competente del Estado miembro en el que usted resida.

Este producto permite a los usuarios de lentes de contacto colocar y quitar las lentes de contacto para utilizarlas de acuerdo con el uso previsto. Por tanto, este producto está considerado como un producto sanitario.

Eliminación de residuos

DMV Corporation recomienda desechar los productos DMV usados conforme a las normas legales vigentes en cada país en el momento de la eliminación.

Este producto es un producto sanitario.

No almacenar a una temperatura superior a 105 °C/220 °F

Lea las instrucciones de uso dmvcorp.com

Representante autorizado

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Proteger de la luz directa del sol

Un solo paciente - uso múltiple

Fecha de fabricación

Importador

Fabricante

País de fabricación

EC REP
Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

CH REP
MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

UK REP
Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

