



lav



## DMV Soft Lens Handler™

### Aplikators mīksto kontaktlēcu izņemšanai/ielikšanai

#### Paredzētā izmantošana

DMV Soft Lens handler ir paredzēts mīksto kontaktlēcu ielikšanai un izņemšanai..

#### Lietošanas instrukcija

Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

Izņemšana – Stingri spiediet satvērēja galus pret mīkstās kontaktlēcas priekšpusi. Skatoties spoguļi, pārliecinieties, ka lēca ir atrodas uz radzenes. Uzmaniģi saspiediet kopā satvērēja galus, lai izņemtu kontaktlēcu.

Ielikšana – Uzlieciet mitru kontaktlēcu uz ierīces mazākā gala atbilstoši bultiņas norādei. Ļaujiet lēcai pārklāt ierīces galu, lai Jūs caur lēcu varētu sekot līdzi procesa gaitai.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

#### Tīrīšana

Pēc katras ierīces izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī. Ieplānojiet tās nomaīņu reizi sešos mēnešos.

**Uzmanību!** Ja ierīce nejausi saskaras ar acs virsmu, vienkārši izņemiet to no acs, jo tā nepiesūcās virsmai. Izvairieties no ierīces bīdīšanas pa acs virsmu.

**Brīdinājums.** Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķīdriem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmējs uz spēcīgi oksidētāji.

**Brīdinājums. Aizrīšanās risks.** Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.

**Brīdinājums.** Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu**, kas ir zināms alergēns.

**NEIZMANTOJIET ierīci kopā ar cietajām, gāzi caurlaidīgajām, sklēras vai hibrīda kontaktlēcām.**

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcu nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.

#### Atkritumu likvidēšana

DMV Corporation iesaka likvidēt izlietotos DMV izstrādājumus atbilstoši likvidēšanas brīdī spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.

Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce

Sargāt no tiešas saules gaismas

Importētājs

Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F

Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai

Ražotājs

Skatīt lietošanas instrukciju [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)

Ražošanas datums

Ražošanas valsts

Pilnvarotais pārstāvis

EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA