



fra



DMV Soft Lens Handler™

Pour insérer et retirer des lentilles de contact souples

But de l'utilisation

Le DMV Soft Lens Handler est conçu pour insérer et retirer des lentilles de contact souples.

Mode d'emploi



Avant d'utiliser le DMV Soft Lens Handler s pour la première fois, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique à 70% et laissez-le sécher à l'air.

RETIRER - Pressez fermement les coussinets entre le pouce et l'index contre l'avant de la lentille de contact souple. Assurez-vous que la lentille est bien sur la cornée en utilisant un miroir. Pressez doucement les pinces pour retirer la lentille de contact.

INSERTION – Placez une lentille de contact humide sur la petite extrémité de l'appareil, là où la flèche l'indique. Laissez la lentille chevaucher l'extrémité de l'appareil pour que vous puissiez voir votre progression à travers la lentille.

Suivez les instructions de votre spécialiste des lentilles de contact / professionnel de la vue.

Nettoyage

Après chaque utilisation, nettoyez le DMV Soft Lens Handler avec de l'alcool isopropylique à 70% et le laissez sécher à l'air libre. Prévoyez de le remplacer après 6 mois.



Précaution: Si vous placez accidentellement le manipulateur de lentille souple DMV directement sur la surface de l'œil, retirez-le simplement avec précaution. Le DMV Soft Lens Handler n'a aucun effet d'aspiration, évitez simplement de faire glisser le DMV Soft Lens Handler sur la surface de l'œil.



Considération: Tenir le DMV Ultra /DMV 45 éloigné de la crème pour les mains, du gel capillaire, du dissolvant pour vernis à ongles et des agents oxydants puissants.



Considération: Risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Garder ce produit et tous les autres instruments médicaux hors de portée des jeunes enfants. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour les yeux malades ou blessés. Si vous avez un œil rouge, si vous avez le mauvais œil ou si vous ressentez une douleur, consultez votre spécialiste en lentilles de contact ou un ophtalmologiste.



Considération: Bien qu'il n'y ait aucune indication d'allergie, DMV Corporation vous rend attentif au fait que ce **produit est fait de caoutchouc naturel sec**. Cependant, **le matériau ne contient pas de latex liquide** connu sous le nom d'allergène.



N'UTILISEZ PAS ce dispositif avec des lentilles de contact rigides perméables aux gaz, sclérales ou hybrides.

Si un incident grave vous concernant est survenu avec cet appareil, signalez-le au fabricant. Si vous résidez dans l'UE, signalez l'incident à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi.

Ce produit permet aux porteurs de lentilles de contact d'insérer et / ou de retirer leurs lentilles de contact afin de les utiliser conformément à leur destination. Par conséquent, il est considéré comme un dispositif médical.

Élimination des déchets

DMV Corporation recommande d'éliminer les produits DMV usagés conformément aux réglementations locales en vigueur au moment de l'élimination.



Dispositif médical



Ne pas conserver plus chaud que 105° C / 220° F



Suivez les instructions d'utilisation dmvcorp.com



Représentant autorisé



EU
Bilos Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Protéger du soleil direct



Un seul patient – à usage multiple



Date de fabrication



Importateur



Fabricant



Pays de fabrication



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

