



slk



DMV Scleral Cup™

Pre sklerálne kontaktné šošovky a očné protézy

Účel použitia

DMV Scleral Cup je navrhnutý na vkladanie/vyberanie sklerálnych kontaktných šošoviek a vyberanie očných protéz.

Návod na použitie

Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

Vyberanie – Navlhčite prísavku a stlačte úchytku. Pred zrkadlom umiestnite prísavku na sklerálnej kontaktnéj šošovke. Uvoľnite tlak na úchytku, aby sa pomôcka mohla prisať na kontaktnú šošovku. Kontaktnou šošovkou potom môžete manipulovať tak, aby bolo možné vybrať kontaktnú šošovku z oka. Pre najlepší spôsob postupujte podľa pokynov vášho špecialistu na kontaktné šošovky. Po vybratí znovu stlačte úchytku na uvoľnenie sacej sily a odoberte šošovku z prísavky..

Vkladanie – Položte mokrá kontaktnú šošovku do jamky bez toho, aby ste stlačili úchytku. Mokrú šošovku priľne k jamke. Počas vkladania šošovky NESTLÁČAJTE úchytku. Jemne vložte sklerálnu šošovku do otvoreného oka.

Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očného špecialistu.

Čistenie

Zakaždým po použití pomôcky DMV Scleral Cup ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. **Vzduchový kanál uchovávajte bez prítomných zvyškov.** Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.

Opatrenie: Ak pomôcka DMV Scleral Cup nechcete priľne k oku, stlačte úchytku na uvoľnenie sacej sily a vyberte pomôcku z oka.

Upozornenie: Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odlakovač a silné oxidačné látky.

Upozornenie: Riziko udusenía. Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojim očným lekárom.

Upozornenie: Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex,** ktorý je známym alergénom.

NEpoužívajte DMV Scleral Cup na MÄKKÉ alebo hybridné kontaktné šošovky.

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladat' a/alebo vyberat' ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.

Likvidácia odpadu

Spoločnosť DMV Corporation odporúča likvidovať použité produkty DMV v súlade s miestnymi predpismi platnými v čase likvidácie.

Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.

105°C
220°F
Neuchovávajte pri teplote viac ako 105 °C./220°F

Prečítajte si návod na použitie.
dmvcorp.com

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Jeden pacient - Viacnásobné použitie

Dátum výroby

Dovozca

Výrobca

Krajina výroby

Splnomocnený zástupca

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

