



DMV Vented Scleral Cup™

Għal Lentijiet tal-Kuntatt Ibridi u Sklerali

Użu Intenzjonat

DMV Vented Scleral Cup hija ddisinjata għal biex wiehed idahħal lentijiet tal-kuntatt Ibridi u Sklerali.

Istruzzjonijiet għall-użu

Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-tagħmir b'70% isopropyl alcohol u hallieh jinxef b'mod naturali.

Inserzjoni – Kanal tal-arja jgħaddi minn ġot-tagħmir biex jiddiżattiva l-ġbid tal-arja. Dan jippermetti li lenti tal-kuntatt tkun tista' titqiegħed fuq l-għajn mingħajr ma tehel mat-tagħmir. Żomm it-tagħmir f'pożizzjoni vertikali u poġġi l-lenti tal-kuntatt fit-tazza tal-ġbid tal-arja. Kun żgur li timla l-lenti bis-soluzzjoni approvata meta ddaħhal lentijiet Ibridi jew Sklerali. B'attenzjoni għolli t-tagħmir lejn l-għajn miftuħa u miss il-lenti mal-għajn billi tuża mera.

Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tiegħek/tal-professionista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.

Tindif

Kull darba wara li tuża DMV Vented Scleral Cup, naddafha b'70% isopropyl alcohol u halliha tinxef b'mod naturali. Ahżen it-tagħmir fil-kaxxa tiegħu wara li jinxef. **Żomm il-kanal tal-arja hieles mill-fdalijiet.** Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.

Prekawzjoni: Jekk applikka t-tagħmir aċċidentalment mal-wiċċ tal-għajn, kemm tiġbdu lura minn mal-għajn, għax ma jkun hemm l-ebda ġbid tal-arja. Evita li tmexxi t-tagħmir fuq il-wiċċ tal-għajn.

Attenzjoni: Jekk jogħġbok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidi bħal krema tal-idejn, ġells tax-xagħar, likwidu għat-tneħħija tal-vernici tad-dwiefer u sustanzi ossidanti qawwijn.

Attenzjoni: Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'il bogħod minn tfal żgħar. Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma' għajnejn li għandhom xi mard jew hsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-għajnejn, indeboliment jew uġih fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professionista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.

Attenzjoni: Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allergija b'dan il-prodott, **fih gomma naturali xotta. Ma fihx latex likwidu,** allergen magħruf.

TUŻAX dan it-tagħmir GĦAT-TNEĤĤIJA tal-lentijiet tal-kuntatt.

Jekk kellek kwalunkwe inċident serju b'rabta ma' dan it-tagħmir, irrappurtah lill-manifattur. Jekk inti residenti fil-UE, irrapporta l-inċident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilti fi.

Dan il-prodott jippermetti lil persuni li jilbsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idahħal u/jew inehħu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabiex jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meġjus li huwa apparat mediku.

Rimi ta' Skart

DMV Corporation tirrakkomanda li l-prodotti DMV użati jintremew skont ir-regolamenti lokali li jkunu fis-seħħ fil-mument tar-rimi.

Dan il-prodott huwa apparat mediku

Tahżinx f'temperatura oġhla minn 105°C / 220°F

Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu dmvcorp.com

Rappreżentant Awtorizzat

Ipproteġi mix-xemx diretta

Pazjent wiehed - użu multiplu

Data tal-Manifattura

Importatur

Manifattur

Pajjiż tal-Manifattura

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

