




SWE

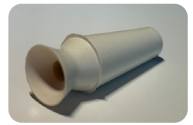

# DMU Vented Scleral Cup™

## För hybridkontaktlinser och sklerala kontaktlinser

### Avsedd användning

DMU Vented Scleral Cup är utformad för att sätta in hybridkontaktlinser och sklerala kontaktlinser.

### Bruksanvisning

Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol och låt lufttorka innan du använder den första gången.

**INSÄTTNING** – En luftkanal löper genom produkten för att inaktivera sugfunktionen. Detta innebär att kontaktlinsen kan placeras på ögat utan att fastna på produkten.

Håll produkten vertikalt och placera kontaktlinsen på sugproppen. Fyll linsen med godkänd lösning vid insättning av hybridkontaktlinser eller sklerala linser. För försiktigt produkten mot det öppna ögat och låt linsen vidröra ögat med hjälp av en spegel.

Följ anvisningarna från din optiker.

### Rengöring

Rengör DMU Vented Scleral Cup med 70 % med isopropylalkohol efter varje användning och låt lufttorka. Förvara produkten i fodralet efter torkning. **Håll luftkanalen fri från föroreningar.** Byt ut den var sjätte månad.

**Försiktighetsåtgärd:** Om du av misstag applicerar produkten på ögats yta, dra bara bort den eftersom den inte har någon sugfunktion. För inte produkten över ögats yta.

**Varning:** Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor som handkräm, härgel, nagellackbortagningsmedel och kraftigt oxiderande ämnen.

**Varning: Kvävningrisk.** Förvara denna och andra medicintekniska produkter utom synhåll för barn. Denna produkt rekommenderas inte vid ögonsjukdom eller skadade ögon. Om du får ögonirritation, ovanlig synnedläggelse eller smärta, kontakta optiker.

**Varning:** Det finns inga bevis för allergiska problem med produkten. **Den innehåller torr naturgummi. Den innehåller inte flytande latex, en känd allergen.**

**Använd INTE produkten FÖR ATT TA UT kontaktlinser.**

Om en allvarig incident har uppkommit i samband med produkten, rapportera det till tillverkaren. Om du bor i ett EU-land, rapportera händelsen till behörig myndighet i det medlemsland där du bor.

Denna produkt gör det möjligt för kontaktlinsebärare att sätta in och/eller ta ut kontaktlinser för att använda dem enligt avsedd användning. Således anses denna produkt vara en medicinteknisk produkt.

### Avfallshantering

DMU Corporation rekommenderar att använda DMU-produkter kasseras i enlighet med lokala anvisningar vid tidpunkten för kassering.

Denna produkt är en medicinteknisk produkt

Förvaras vid högst 105°C  
220°F

Läs bruksanvisningen  
dmucorp.com

Skyddas mot direkt solljus

En patient – flera användningar

Tillverkningsdatum

Importör

Tillverkare

Tillverkningsland

Auktoriserad representant

EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMU Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

